



cobas® click

cobas® HbA1c Test 2. Gen.

Verbessern Sie die langfristige glykämische Kontrolle mit minimierter Interferenz durch Hb-Varianten.



Einfache, direkte Anwendung: Probe direkt aus dem Fingerstich auftragen – keine Blutentnahme erforderlich¹



Kleine Blutprobe: 2,5 µl frisches Kapillarvollblut oder EDTA-Vollblut¹



Einfache Lagerung: Bei Raumtemperatur (2 °C – 30 °C)¹



Schnelle Ergebnisse: Zuverlässige Ergebnisse in nur 6 Minuten¹



Optimierte Hb-Messung
Hohe Genauigkeit und weniger Interferenzen durch Hb-Varianten^{1,2}



Doppeltest
HbA1c und Lipide in einem 15-minütigen Arbeitsablauf testen¹



**cobas® click. Vertrauen, das Sie hören können –
Leistung, der Sie vertrauen können.**


Medizinische Verwendung und medizinischer Nutzen

Präzise, langfristige Blutzuckerkontrolle durch fortschrittliches Assay-Design.


- Personen identifizieren, die derzeit mit nicht diagnostiziertem Diabetes leben.³
- Zuverlässige Überwachung der langfristigen Blutzuckerkontrolle mit HbA1c-Tests anhand des Goldstandards.^{4,5}
- Schnelle, fundierte Entscheidungen mit schnellen Ergebnissen am Point-of-Care treffen, um Therapieanpassungen zu unterstützen, die Einhaltung der Medikamenteneinnahme zu verbessern und die Patientenzufriedenheit zu steigern.⁶⁻⁸

Einfacher Arbeitsablauf


Der **cobas®** HbA1c Test der 2. Generation ist zur Verwendung mit dem **cobas® click** oder **cobas® b 101** Gerät vorgesehen. Lesen Sie vor Verwendung dieses Tests die im Kit enthaltene Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.

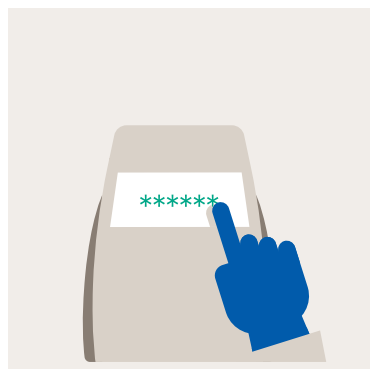

1 Patiententest auswählen und Daten eingeben

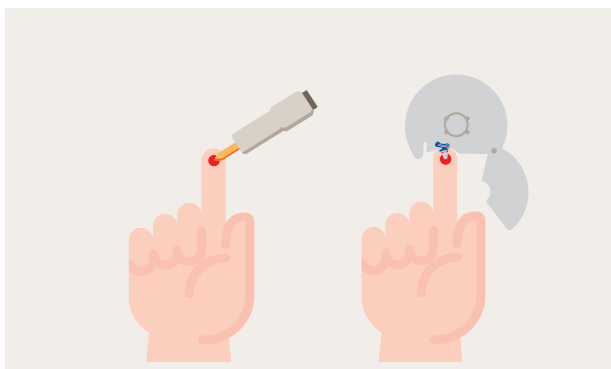

2 Den Finger vorbereiten und in den Finger stechen, dann die Testdisc auf den Blutstropfen legen

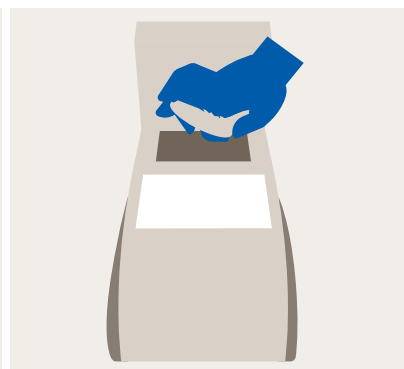

3 Die Testdisc in das Gerät einsetzen und den Deckel schließen

Technische Daten¹

Probentyp	Kapillarovollblut, venöses EDTA-Vollblut
Probengröße	2,5 µl
Haltbarkeit der Probe auf der Disc	1 Min.
Zeit bis zum Ergebnis	< 6 Min.
Präzision	1,3 – 1,8 % CV* (Vollblut)
Messbereich	20 – 130 mmol/mol (IFCC) oder 4 – 14 % (DCCT/NGSP)
Diagnose von Diabetes mellitus	> 48 mmol/mol HbA1c (IFCC) oder 6,5 % HbA1c (DCCT/NGSP) ³
Externe Kontrollen	cobas® HbA1c Control 2. Gen., separat erhältlich
Lagerung der Discs	2 – 30 °C

*Wiederholbarkeit

1 Roche Diagnostics International Ltd. cobas® HbA1c Test Method Sheet. (v1.0). 2025.

2 Roche Diagnostics International Ltd. Daten liegen vor. Stand Mai 2025.

3 ElSayed NA, et al. Improving care and promoting health in populations. Diabetes Care. 2023;46 (Suppl 1):S10-S18.

4 Sacks DB, et al. Guidelines and Recommendations for Laboratory Analysis in the Diagnosis and Management of Diabetes Mellitus. Clin Chem. 2023;69(8):808-868.

5 Hanas R, et al. 2010 consensus statement on the worldwide standardization of the hemoglobin A1C measurement. Diabetes Care. 2010; 33(8):1903-4.

6 Motta LA, et al. Point-of-care testing improves diabetes management in a primary care clinic in South Africa. Prim Care Diabetes. 2017;11:248-253.

7 Misra S, et al. How Can Point-of-care Technologies Support In-Hospital Diabetes Care? J Diabetes Sci Technol. 2023;17(2):509-516.

8 Miller CD, et al. Rapid A1c availability improves clinical decision-making in an urban primary care clinic. Diabetes Care. 2003;26(4):1158-63.

Roche Diagnostics Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim

COBAS und COBAS CLICK sind Marken von Roche.
© 2026 Roche Diagnostics. Alle Rechte vorbehalten.

www.roche.de

① 0726

Weitere Informationen finden Sie unter:
<https://go.roche.com/cobas-click.de>

