



cobas® click

cobas® Lipid Panel Gen. 2

Lipidtests mit einem ausfallsicheren Mechanismus verbessern.



Einfache direkte Anwendung: Probe direkt aus dem Fingerstich auftragen – keine Blutentnahme erforderlich¹



Kleine Blutprobe: 17 µl Kapillarovollblut, venöses Vollblut (EDTA)¹



Einfache Lagerung: Bei Raumtemperatur (2 °C – 30 °C) lagern¹



Schnelle Ergebnisse: Zuverlässige Ergebnisse in nur 6 Minuten¹



Ausfallsichere Triglyceride
Integrierter ausfallsicherer Mechanismus mit hoher Genauigkeit für Triglyceride^{1,2}



Doppeltest
HbA1c und Lipide in einem 15-minütigen Arbeitsablauf testen¹



**cobas® click. Vertrauen, das Sie hören können –
Leistung, der Sie vertrauen können.**

Medizinische Anwendung und medizinischer Nutzen

Präzise Lipidtests durch fortschrittliches Assay-Design.


- Frühzeitige Erkennung von Hochrisikopatientinnen und -patienten durch Erkennung von Anzeichen des metabolischen Syndroms und frühzeitigere Beurteilung des Risikos für kardiovaskuläre Erkrankungen.^{3,4}
- Verbesserung des Cholesterinmanagements durch zuverlässige Erkenntnisse, um fundierte Behandlungsentscheidungen für Hochrisikopatientinnen und -patienten zu unterstützen.^{4,5}
- Den Fortschritt durch Bewertung der Lipidziele der Patientinnen und Patienten und fundierte Anpassungen der Behandlung zuverlässig überwachen.^{6,7}
- Zuverlässige Ergebnisse als Grundlage für Empfehlungen zur Lebensweise und zur Gewährleistung der Therapietreue.⁸

Einfacher Arbeitsablauf

Das **cobas®** Lipid Panel der 2. Generation ist zur Verwendung mit dem **cobas® click-** oder **cobas® b 101** Gerät vorgesehen. Lesen Sie vor Verwendung dieses Tests die im Kit enthaltene Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.



- 1 Patiententest auswählen und Daten eingeben

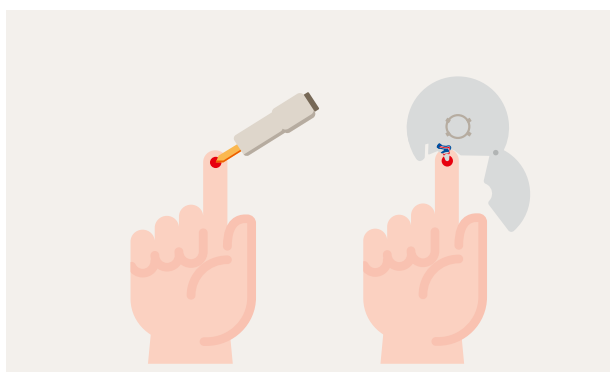

- 2 Den Finger vorbereiten und in den Finger stechen, dann die Testdisc auf den Blutstropfen legen



- 3 Die Testdisc in das Gerät einsetzen und den Deckel schließen

Technische Daten¹

Probentyp	Kapillarovollblut, venöses EDTA-Vollblut
Probengröße	17 µl
Zeit bis zum Ergebnis	< 6 Min
Präzision	TC: 1,2 – 1,6 % CV, TG: 1,0 – 1,6 % CV, HDL: 1,4 – 3,3 % CV (Plasma)*
Messbereich	TC: 50 – 500 mg/dl, TG: 45 – 650 mg/dl, HDL: 15 – 100 mg/dl
Externe Kontrollen	cobas® Lipid Control 2. Gen., Kontrollen separat erhältlich
Lagerung der Discs	2 – 30 °C

* Wiederholbarkeit

1 Method Sheet cobas® click Lipid Panel Gen. 2 (v1.0). 2025. Roche Diagnostics International Ltd.

2 Roche Diagnostics International Ltd. Data on file. Stand Mai 2025

3 Grundy SM, et al. Definition of metabolic syndrome: Report of the National Heart, Lung, and Blood Institute/American Heart Association conference on scientific issues related to definition. Circulation. 2004;109(3):433-8.

4 Mach F, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020;41(1):111-188.

5 Santschi V, et al. Impact of pharmacist care in the management of cardiovascular disease risk factors: a systematic review and meta-analysis of randomized trials. Arch Intern Med. 2011;171(16):1441-53.

6 Gerrald KR, et al. Evaluation of a pharmacist-managed lipid clinic that uses point-of-care lipid testing. J Clin Lipidol. 2010;4(2):120-125.

7 AlAhmad MM, et al. Impact of pharmacist-led intervention on lipid management in patients with dyslipidemia: A quasi-experimental study. PLoS One. 2023;18(3):e0283369.

8 American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes—2020 Abridged for Primary Care Providers. Clin Diabetes. 2020;38(1):10-38.

Roche Diagnostics Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim

COBAS und COBAS CLICK sind Marken von Roche.
© 2026 Roche Diagnostics. Alle Rechte vorbehalten.

www.roche.de

① 0726

Weitere Informationen finden Sie unter:
<https://go.roche.com/cobas-click.de>

