


Kurzbedienungsanleitung

Spotchem D-Concept


- 1** Reagenzien morgens aus dem Kühlschrank nehmen und vor der ersten Analyse ca. 20 Min. stehen lassen. Die Reagenzien müssen für die Analysen Raumtemperatur haben.
- 2** Gerät auf der Vorderseite mit Taste  einschalten (Aufwärmzeit ca. 4 Min.).
- 3** Auf dem Display erscheint «Standby».
- 4 Messungen**
 - a) Analysenmodul auswählen mit Tasten   
 - b) Analysenmodul mit Taste  öffnen.
 - c) Taste «2» wählen, um **ID** einzugeben, mit Taste  bestätigen.
Optional: Taste «5» wählen, um **Probentyp** einzugeben: Auswahl mit Taste , mit Taste  bestätigen.
- 5** Einsetzen der grauen **Pipettenspitzen** in den Spitzenbehälter (linke Seite).
- 6 Reagenzien**

D-02: Elektrolytplättchen in die Halterung einlegen und **Referenzlösung** (Schutzfolien jeweils entfernen) in den Spitzenbehälter einsetzen (linke Seite).

D-02/03: Single- oder Multi-Teststreifen aus der Schutzfolie entnehmen und in die Positionen S1-S6 (für Einzelteststreifen) bzw. den Multiteststreifen quer oberhalb einlegen.
- 7 Probenmaterial**

Serum/Plasma (D-02/03)
In das entsprechende Probencup füllen (Füllmenge muss zwischen den beiden Markierungen liegen) und in Spitzenbehälter einsetzen.

Vollblut (D-03)
Zentrifugen-Probencup füllen (ca. 500 µl), Probencup ohne Deckel in die Zentrifuge des Gerätes stellen, Zentrifugendeckel schliessen.

Achtung: Keine Blutropfen am oberen Gefässrand!
- 8** Analysen mit Taste  starten.
- 9** Das Gerät arbeitet die Analysen vollautomatisch ab. Nach Beendigung der Messung öffnet sich die Frontklappe: Reagenzien, Probenmaterial und, falls vorhanden, Referenzlösung entfernen.
- 10** Abends das Gerät mit Taste  ausschalten und Reagenzien über Nacht im Kühlschrank lagern.

Bedienelemente

Spotchem D-Concept

Nr.	Symbol	Funktion
1	(Keins)	Anzeige des Gerätestatus und der Einstellungen. Nähere Angaben finden Sie in Abschnitt «2-1 Anzeigen» (Seite 2-1).
2		Eine dieser Tasten drücken, um eine Messeinheit (bzw. ein vorhandenes Modell) auszuwählen.
3		Drücken, um die Messung zu starten.
4		Drücken, um die Messung abubrechen.
5		Zum Durchblättern der Seiten mit den Messergebnissen, Suchergebnissen usw.
6	0 [•] 1 [•] ~ 9 ^w XYZ	Für numerische Angaben: <ul style="list-style-type: none"> • Zur Auswahl einer Menünummer während der Menübedienung. • Buchstaben können bei der Eingabe der Proben-ID usw. eingegeben werden. • In der Status-Anzeige auf «0» drücken, um zur Anzeige «Hauptmenü» zurückzukehren.
7		Drücken, um die letzte Eingabe zu löschen.
8		Drücken, um die Messergebnisse zu drucken.
9		Die Taste drücken, um: <ul style="list-style-type: none"> • den aktuellen Bearbeitungsvorgang abubrechen. • zum nächst höheren Menü zurückzukehren. • zur letzten Anzeige ohne Speicherung der Einstellungen zurückzukehren, oder • von der Anzeige «Hauptmenü» zur Status-Anzeige zurückzukehren.
10	—	Drücken, um bei der Eingabe eines numerischen Wertes oder eines Passwortes: <ul style="list-style-type: none"> • den Cursor bei der Eingabe von Zeichenfolgen nach rechts zu bewegen, oder • den Cursor bei der Datums- und • Uhrzeiteingabe zwischen den Eingabefeldern zu bewegen. • Zur Markierung von Menüpunkten in den Auswahlanzeigen.
11		Drücken und gedrückt halten, um das Druckerpapier einzuziehen.
12		Drücken, um die Einstellung zu bestätigen.
13		Drücken, um die Messergebnisse an ein externes Gerät zu übermitteln, sofern eins angeschlossen ist.
14		Drücken, um das Gerät während des regulären Gebrauchs ein- und auszuschalten.
15	(Keins)	Leuchtet blau, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
16	(Keins)	Blinkt während der Kommunikation mit einem externen Gerät orange.
17	(Keins)	Blinkt rot, wenn ein Fehler aufgetreten ist.

