


# Kurzbedienungsanleitung

## Spotchem EL SE-1520

- 1** Reagenzien am Morgen aus dem Kühlschrank nehmen und vor der ersten Analyse ca. 15 Minuten stehen lassen. Die Reagenzien müssen für die Analysen Raumtemperatur haben.
- 2** Gerät auf der Rückseite mit Taste «on» einschalten. (Aufwärmzeit ca. 2 Min.)
- 3** Auf dem Display erscheint: 1. Messen / 2. U-Menue / 3. Kalibrieren.
- 4** Für Messungen Taste «1» Messen anwählen (Das Gerät ist nun im «Stand-by Mode» und der gelbe Plattenübertragungsbereich kommt hervor).
- 5** Eingabe der Probennummer (4-stellig) Taste «1». Eingabe der Patientenidentifikation (13-stellig) nochmals «Enter» drücken. Die benötigte Nummer direkt oder durch mehrfaches Tastendrücker den Namen des Patienten eingeben und mit «Enter» bestätigen.
- 6** Optional: Eingabe Probenmaterial: Taste «2» Info. Anschliessend Lot.-Nr. mit Taste «Enter» bestätigen. Auf der nächsten Anzeige erscheint Typ der Probe. Durch drücken der Taste «-/» gewünschtes Probenmaterial auswählen und mit «Enter» bestätigen.

- 7** Einsetzen des Plättchens in den Plattenübertragungsbereich (Pfeil auf Reagenzplättchen muss nach vorne gerichtet sein). Anzeige wechselt auf «Probe anwenden». Probenmaterial, inkl. der Referenzlösung, mit der Pipette auftragen. Pipette entfernen, die Messung startet automatisch.

Referenzlösung sofort wieder verschliessen. Keine Referenzlösung verwenden, deren Restvolumen unterhalb Markierung (Etikette Referenzlösung) liegt. Siehe dazu weitere Hinweise Packungsbeilage.

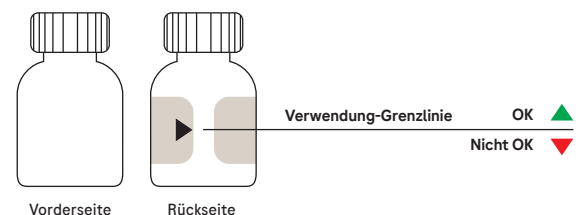

- 8** Nach Beendigung der Messung wird das Plättchen automatisch ausgeworfen. Das Gerät bleibt im Messmodus. Das nächste Plättchen kann eingesetzt werden um weitere Messungen vorzunehmen.
- 9** Mit der Taste «Stop» kann man wieder in das Hauptmenu wechseln.
- 10** Am Abend das Gerät auf der Rückseite ausschalten und die Reagenzien über Nacht im Kühlschrank lagern.

## Kalibration

# Spotchem EL SE-1520

Beim Gebrauch einer neuen Packung Testplättchen muss zuerst die beigelegte Kalibrationskarte eingelesen werden.

- 1** Beim Einschalten des Gerätes erscheint auf dem Display: 1. Messen / 2. U-Menue / 3. Kalibrieren.
- 2** Betätigen der Taste «3» für Kalibration.
- 3** Auf dem Display erscheint: 1. Karte / 2. Info.
- 4** Betätigen der Taste «1» für Karte.
- 5** Auf dem Display erscheint: Karte ein.
- 6** Die benötigte Karte durch den Einlese-schlitz (links vom Display) ziehen (von hinten nach vorne).
- 7** Auf dem Display erscheint: Karte ein gleich. Streif.
- 8** Die Karte nochmals genau wie in Punkt 6 beschrieben einlesen.
- 9** Die neue Lot. Nr. der entsprechenden Teststreifen ist eingelesen und kann benützt werden. Zurück ins Hauptmenu mit 2 × Stop.

