

Kurzbedienungsanleitung

Spotchem EZ SP-4430

- 1** Reagenzien am Morgen aus dem Kühlschrank nehmen und vor der ersten Analyse ca. 20 Minuten stehen lassen. Die Reagenzien müssen für die Analysen Raumtemperatur haben.
- 2** Gerät auf der Rückseite mit Taste «on» einschalten. (Aufwärmzeit ca. 4 Min.)
- 3** Auf dem Display erscheint: 1. Messen / 2. U-Menue / 3. Kalibrieren.
- 4** Für Messungen Taste «1» Messen anwählen (Das Gerät ist nun im «Stand-by Mode» und die Fronttüre öffnet sich).
- 5** Falls Patientenidentifikation gewünscht ist: Eingabe der Probennummer (4-stellig) Taste «1». Eingabe der Patientenidentifikation (13-stellig) nochmals «Enter» drücken. Benötigte Nummer oder durch mehrfaches drücken Namen des Patienten eingeben und mit «ok» bestätigen.
- 6 Probenmaterial**
Vollblut (venös oder kapillär)
 in den entsprechenden Probencup füllen (Füllmenge 250 µl (+/- 10 µl)).
 Achtung: keine Blutropfen am oberen Gefässrand! Cup in die Zentrifuge des Gerätes stellen, Zentrifugenring aufsetzen.

Serum in den entsprechenden Probencup füllen (Füllmenge muss zwischen den beiden Markierungen sein). Cup in den dafür vorgesehenen Platzhalter stellen (rechts neben Zentrifuge).
- 7** Einsetzen der blauen Pipettenspitze am vorgesehenen Platzhalter (rechts neben Zentrifuge). Pro Patient genügt eine Spitze.
- 8** Die gewünschten Single- oder Multistreifen aus der Schutzfolie entnehmen und in die Positionen S1-S3 (für Singlestreifen) und den Multistreifen quer daneben einlegen.
- 9** «Start» Taste betätigen. Das Gerät bearbeitet vollautomatisch die Analysen bis zum Ausdruck der Resultate. Nach Beendigung der Messung öffnet sich die Fronttüre und anschliessend können Streifen und Probenmaterial entfernt werden. Multistreifen quer daneben einlegen.
- 10** Am Abend das Gerät auf der Rückseite ausschalten und die Reagenzien über Nacht im Kühlschrank lagern.

Kalibration mittels Magnetkarte

Spotchem EZ SP-4430

Beim Gebrauch einer neuen Packung Teststreifen muss zuerst die beigelegte Kalibrationskarte eingelesen werden.

- 1** Beim Einschalten des Gerätes erscheint auf dem Display: 1. Messen / 2. U-Menue / 3. Kalibrieren.
- 2** Betätigen der Taste «3» für Kalibration.
- 3** Auf dem Display erscheint: 1. Card / 2. Cal. / 3. Information.
- 4** Betätigen der Taste «1» für Card (Fronttüre öffnet sich).
- 5** Auf dem Display erscheint: Karte ein.
- 6** Die benötigte Karte zuerst mit der Seite No. 1 durch den Einleseschlitz (oberhalb Display) ziehen (von links nach rechts).
- 7** Auf dem Display erscheint: «Karte ein, Erneut Streifen».
- 8** Die Karte nochmals genau wie in Punkt 6 beschrieben einlesen.
- 9** Auf dem Display erscheint: «Karte ein, Neuer Streifen».
- 10** Die Karte wenden und wie oben beschrieben 2 × einlesen. Die Karte erneut wenden und 2 × einlesen, bis alle 4 Magnetstreifen eingelesen wurden.
- 11** Die neue Lot.-Nr. der entsprechenden Teststreifen ist eingelesen und kann benutzt werden.
- 12** Zurück ins Hauptmenu mit 2 × Stop oder der Menue Taste.

