

# Notice d'utilisation abrégée


## Spotchem EL SE-1520

- 1** Sortir les réactifs du réfrigérateur le matin et laisser reposer env. 15 minutes avant la première analyse. Les réactifs doivent être à température ambiante pour les analyses.
- 2** Allumer l'appareil en appuyant sur la touche « On » située à l'arrière. (Temps de chauffe env. 2 min.)
- 3** L'écran affiche : 1. Mesure / 2. Submenu / 3. Cal.
- 4** Pour mesurer, sélectionner la touche « 1 » Mesurer (L'appareil est maintenant en mode veille et la porte frontale s'ouvre).
- 5** Pour saisir l'identification patient : touche « 1 » ID. Saisir le numéro requis directement ou saisir le nom du patient en appuyant plusieurs fois sur les touches et confirmer en appuyant sur « Enter ».
- 6** Optionnel : Saisie du type d'échantillon : touche « 2 » Info. Confirmer ensuite le n° de lot en appuyant sur « Enter ». L'écran affiche ensuite le type d'échantillon. Sélectionner le type d'échantillon requis en appuyant sur la touche « -/ » et confirmer en appuyant sur « Enter ».

- 7** Insertion de la plaquette dans la zone de transfert de plaque (la flèche sur la plaquette de réactif doit être dirigée vers l'avant). L'écran passe à « Utiliser l'échantillon ». Appliquer l'échantillon, y compris la solution de référence, avec la pipette. Retirer la pipette, la mesure démarre automatiquement.

Refermer immédiatement la solution de référence. Ne pas utiliser une solution de référence dont le volume résiduel se situe en dessous du repère (étiquette de la solution de référence). Pour d'autres informations, consulter la notice d'emballage.

- 8** Une fois la mesure terminée, la plaquette est éjectée automatiquement. L'appareil reste en mode de mesure. La prochaine plaquette peut être insérée pour effectuer d'autres mesures.

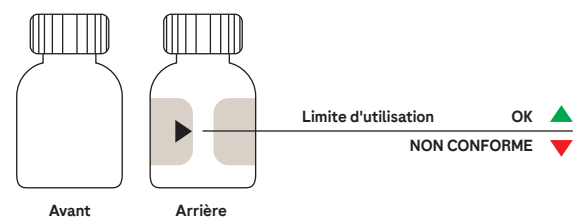

- 9** La touche « Stop » permet de retourner au menu principal.
- 10** Le soir, éteindre l'appareil en appuyant sur la touche située à l'arrière et conserver les réactifs au réfrigérateur pendant la nuit.

## Calibration

# Spotchem EL SE-1520

Lors de l'utilisation d'une nouvelle boîte de plaquettes de test, il faut d'abord faire lire la carte de calibration jointe.

- 1** Lors de l'allumage de l'appareil, l'écran affiche : 1. Mesurer / 2. Menu sub. / 3. Calibrer.
- 2** Appuyer sur la touche « 3 » pour la calibration.
- 3** L'écran affiche : 1. Carte / 2. Info.
- 4** Appuyer sur la touche « 1 » pour insérer la carte.
- 5** L'écran affiche : Insérer carte.
- 6** Faites passer la carte requise par la fente de lecture (à gauche de l'écran, de l'arrière vers l'avant).
- 7** L'écran affiche : insérer carte – même bandelette.
- 8** Passer la carte à nouveau dans le lecteur exactement comme décrit au point 6.
- 9** Le nouveau numéro de lot des bandelettes correspondantes a été lu et peut être utilisé. Retour au menu principal avec 2 × Stop.

