









Istruzioni in breve sistema CoaguChek® Pro II

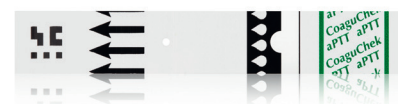

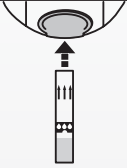Art. 06882382016

Esecuzione di una misurazione aPTT

	<p>a) Nel menu principale selezionare il tasto  Test paziente</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se è stata selezionata l'opzione «ID paziente» Inserire l'ID paziente con nome o numero utilizzando la tastiera del display o lo scanner - Se non è stata selezionata l'opzione «ID paziente» Compare il simbolo che richiede di inserire la striscia reattiva - Con l'opzione «Selezione parametro» attivata selezionare il test corrispondente
	<p>b) Una volta comparso il simbolo che invita a inserire la striscia reattiva nello strumento, inserire la striscia reattiva in modo che la scritta verde «CoaguChek aPTT» sia rivolta verso l'alto (Se si utilizza un nuovo lotto di strisce reattive, è necessario inserire subito il nuovo code chip)</p>
	<p>c) Il simbolo della clessidra indica il pre-riscaldamento della striscia reattiva</p>
 <p>3 minuti</p>	<p>d) Al termine del pre-riscaldamento, il simbolo della goccia di sangue lampeggia e indica che lo strumento è pronto per la misurazione Contemporaneamente inizia il conto alla rovescia di 3 minuti La goccia di sangue (almeno 8 µl) deve essere applicata entro 15 secondi dalla puntura del polpastrello</p>
	<p>e) Quando compare il simbolo della goccia di sangue sul display, pungere il polpastrello e applicare la goccia di sangue entro 15 secondi; sono previste le seguenti 3 opzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Applicare la goccia di sangue direttamente dal polpastrello sull'area semicircolare trasparente di applicazione campione 2. Tenere la goccia di sangue lateralmente rispetto all'area di applicazione — il sangue viene assorbito per azione capillare 3. Applicare la goccia di sangue con il capillare CoaguChek sull'area semicircolare trasparente di applicazione campione
	<p>f) Quando è stato applicato sangue sufficiente (almeno 8 µl), appare il simbolo della clessidra e la misurazione ha inizio</p>
	<p>g) Il risultato viene indicato nell'unità di misura selezionata e memorizzato</p>
	<p>h) 3 alternative possibili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inserire un commento 2. Visualizzare il QR Code 3. Tornare al menu principale, togliere la striscia reattiva e spegnere lo strumento
	<p>Intervallo di misura: 20 - 130 secondi plasma equivalenti</p>

Esecuzione di un controllo di qualità aPTT




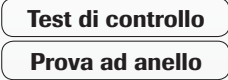







Art. 06882692190

1. Preparazione del controllo di qualità

- Prima della dissoluzione portare il flaconcino e la pipetta a temperatura ambiente per almeno 15 minuti
- Preparare il flaconcino con il **tappo verde**, la pipetta e il code chip
- Aprire il tappo del flaconcino e togliere con cautela il cappuccio di gomma
- Tenere la pipetta con il collo rivolto verso l'ALTO e scuotere il liquido. Quindi tagliare con le forbici la chiusura terminale della pipetta e dispensare completamente l'intero contenuto nel flaconcino.
Mettere da parte la pipetta per la procedura successiva
- Ruotare** con precauzione il flaconcino fino a sciogliere completamente il liofilizzato. Non scuotere o capovolgere il flaconcino
- Durante il tempo di ricostituzione di 5 minuti scuotere di tanto in tanto il flaconcino. Verificare che il liofilizzato sia completamente sciolto
- Applicare il materiale di controllo ricostituito entro 5 minuti**

2. Esecuzione del controllo di qualità

	<p>a) Premere il tasto on/off — Sul display compare il menu principale</p>
	<p>b) Selezionare il tasto  Test di controllo</p>
	<p>c) Per eseguire un controllo di qualità interno, selezionare il campo «Test di controllo»; per eseguire un controllo di qualità esterno, selezionare il campo «Prova ad anello»</p>
	<p>d) Se è attiva l'opzione «Selezione parametro» selezionare il controllo corrispondente Inserire la striscia reattiva in modo che la scritta «CoaguChek aPTT» sia rivolta verso l'ALTO (Se si utilizza un nuovo lotto di strisce reattive, inserire per primo il nuovo code chip riportato sulla scatola)</p>
<p>025</p>  <p>* Nuovo codice</p>	<p>e) Anche la soluzione di controllo ha un code chip</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se il n° del code chip è già presente nella selezione, selezionare o scansionare il codice corrispondente - Se il n° del code chip non è ancora elencato nella selezione, selezionare il tasto * Nuovo codice, togliere il code chip delle strisce reattive dallo strumento e sostituirlo con il code chip della soluzione di controllo
	<p>f) Selezionare livello 1 o livello 2</p>
	<p>g) Il simbolo della clessidra indica il pre-riscaldamento della striscia reattiva</p>
 <p>3 minuti</p>	<p>h) Quando il simbolo della pipetta lampeggia, lo strumento è pronto per la misurazione Contemporaneamente inizia il conto alla rovescia di 3 minuti</p>
	<p>i) Applicare 8 µl di soluzione di controllo entro 3 minuti utilizzando la pipetta di plastica</p>
	<p>j) Il risultato viene visualizzato assieme all'intervallo di controllo</p>
	<p>k) È possibile aggiungere un commento o tornare al menu principale</p>

COAGUCHEK e PERCHÈ È LA MIA VITA sono marchi di Roche. © 2016 Roche

Roche Diagnostics (Schweiz) SA
 Industriestrasse 7
 6343 Rotkreuz
 Tel. 041 799 61 00
 Fax 041 799 65 55
 www.roche-diagnostics.ch

CoaguChek®
 Perché è la mia vita