


Performance Daten

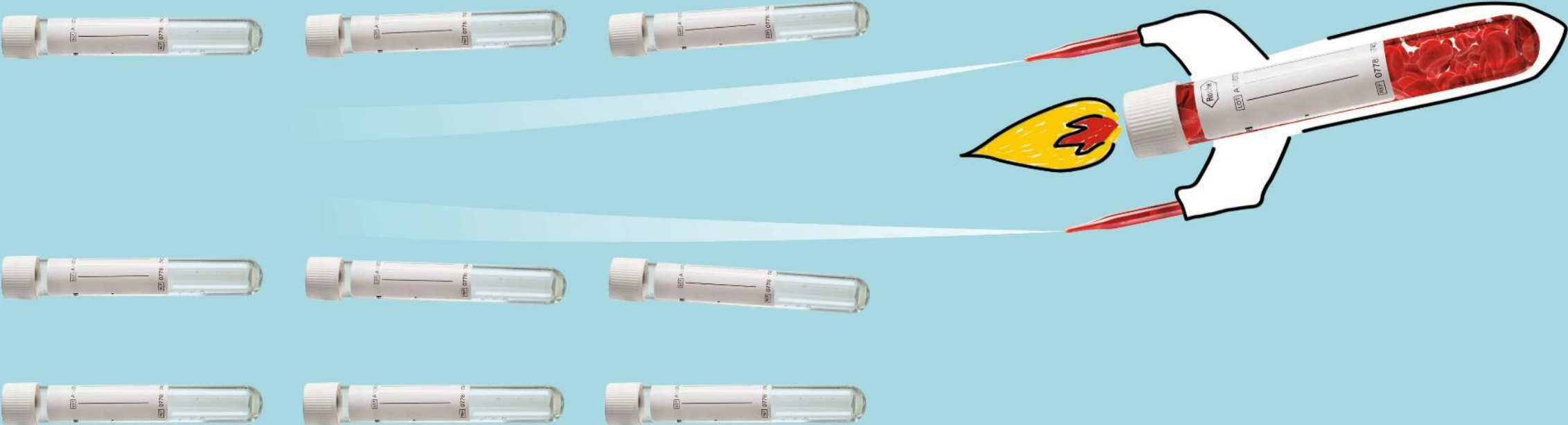


Leistung qualitativ hochwertiger Anämie-Assays

Elecsys[®] Ferritin-Assay bietet Best-in-Class-Präzision




Ferritin VK% vs. Konzentration (Mittel aller) µg/l NEQAS 2015

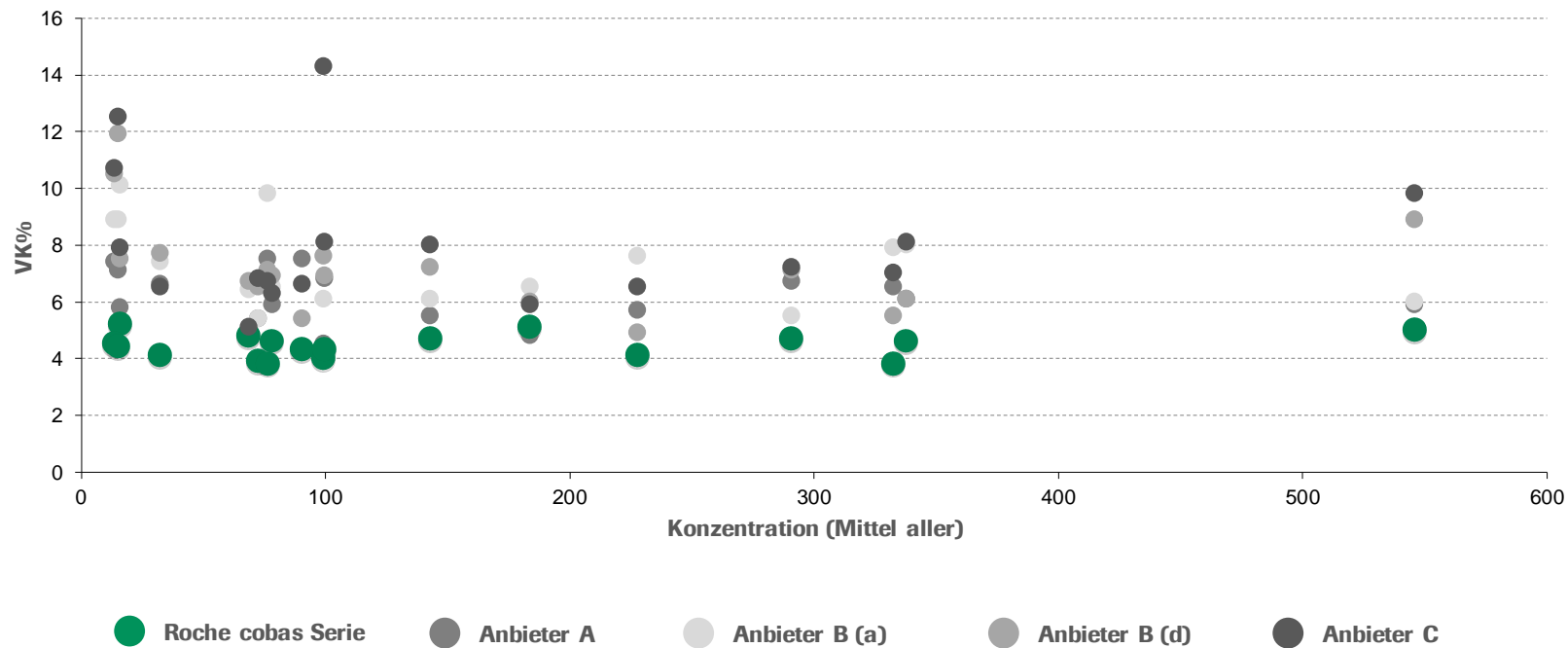

Quelle: NEQAS ring trial results 2015; data on file

Leistung des Elecsys® Ferritin-Tests

*Herausragende Vergleichbarkeit von Lot zu Lot:
konsistente Patientenergebnisse im Zeitverlauf*

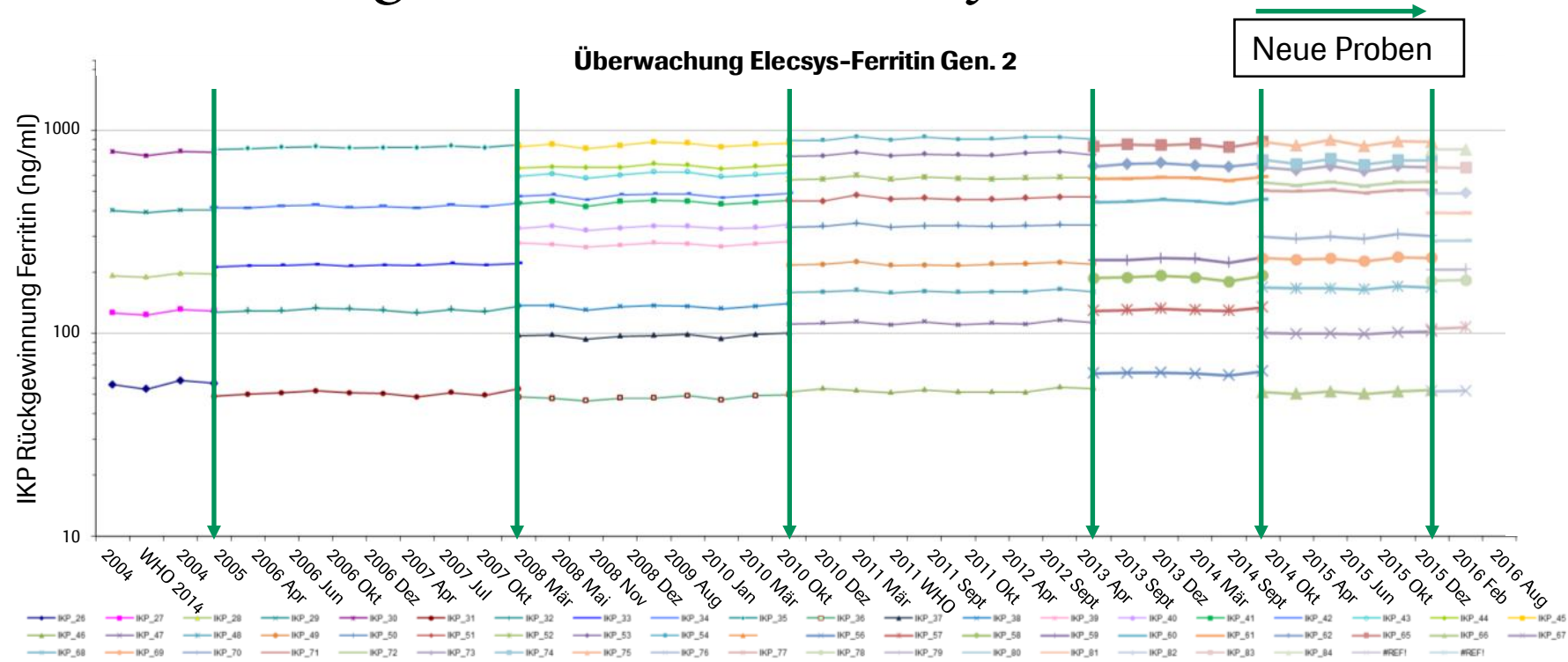

Die Verwendung des WHO 3rd International Standard (IS) als Kalibrator bestätigte hervorragende Wiederfindung.

Quelle: Internal data; data on file


Elecsys® Active B12 Assay

Ringversuchsergebnisse




Wiederfindung von Ringversuchs- und PreciControl-Proben für Elecsys® Active B12

Mittlere Wiederfindungsrate verglichen mit Zielwert von Roche PC- & UK NEQAS-Proben (Angabe der Zentren)

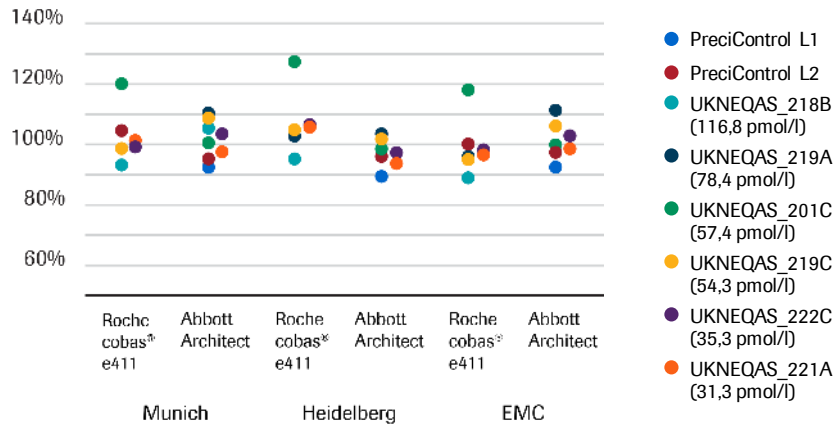

Mittlere Wiederfindungsrate verglichen mit Zielwert von Roche PC- & UK NEQAS-Proben (Angabe der Proben)

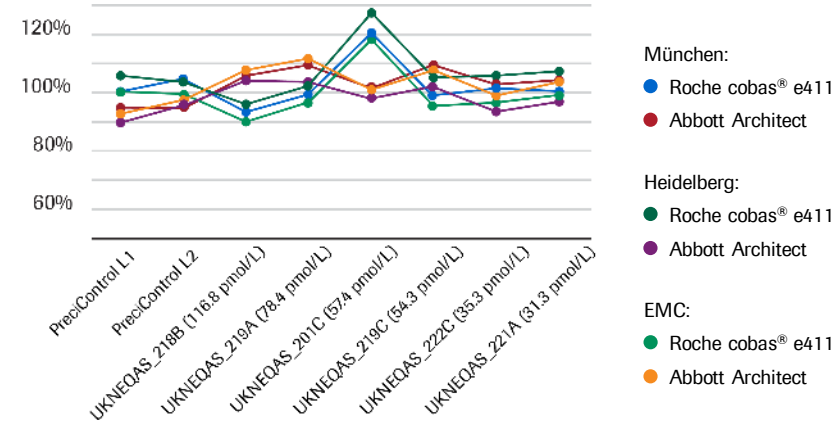

**Wiederfindung von PC Aktiv B12 und Ringversuchsproben klar im Bereich von +/- 10 %
Für eine Ringversuchsprobe ergab sich auf allen Elecsys-Systemen eine höhere Abweichung:
wahrscheinlich verursacht durch Matrixfaktoren in der Matrix der Ringversuchsprobe.**


Quelle: MCE data; *Daten generiert nach Abbott Neustandardisierung

Einheitliche Ergebnisse auf allen Immunologie-Plattformen

Elecsys[®] Active B12 Assay minimiert die Schwankungsprobleme von Lot zu Lot

Einhaltung des Elecsys[®] - Standards:

Exzellente Vergleichbarkeit von Lot zu Lot

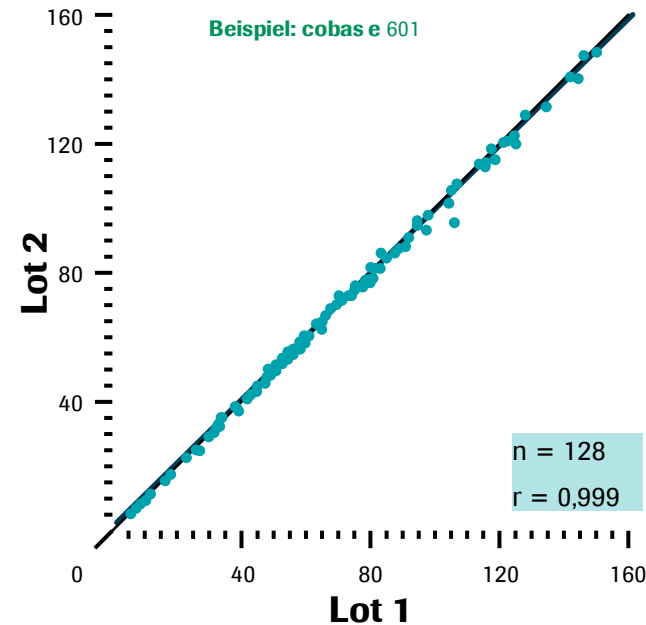


Quelle: Internal data; data on file

Leistung qualitativ hochwertiger Anämie-Assays

Hervorragende Präzision mit Elecsys[®] Vitamin-B12-Test

B12 VK% vs. Konzentration (Mittel aller) µg/l NEQAS 2015

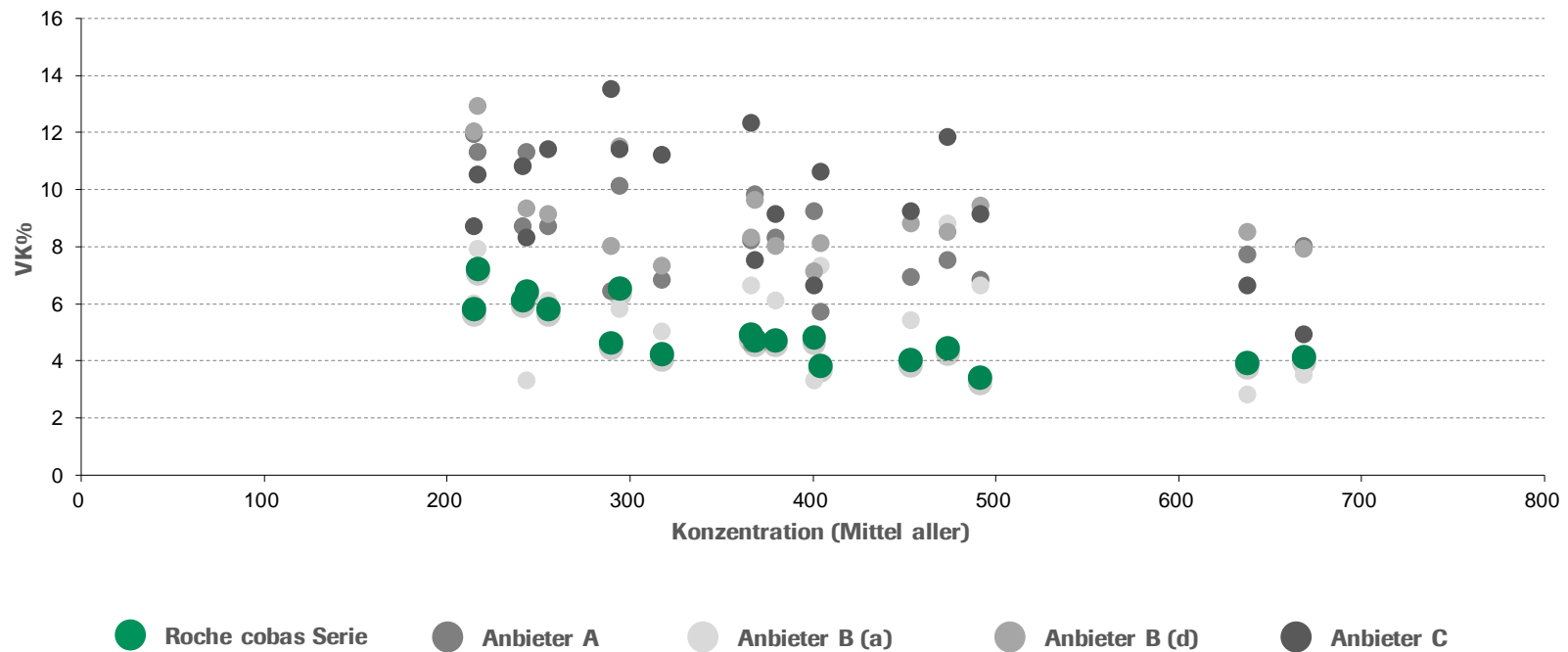


Quelle: NEQAS ring trial results 2015; data on file

Leistung qualitativ hochwertiger Anämie-Assays

Elecsys[®] Folat III-Assay bietet ausgezeichnete Präzision

Folat VK% vs. Konzentration (Mittel aller) µg/l NEQAS 2015

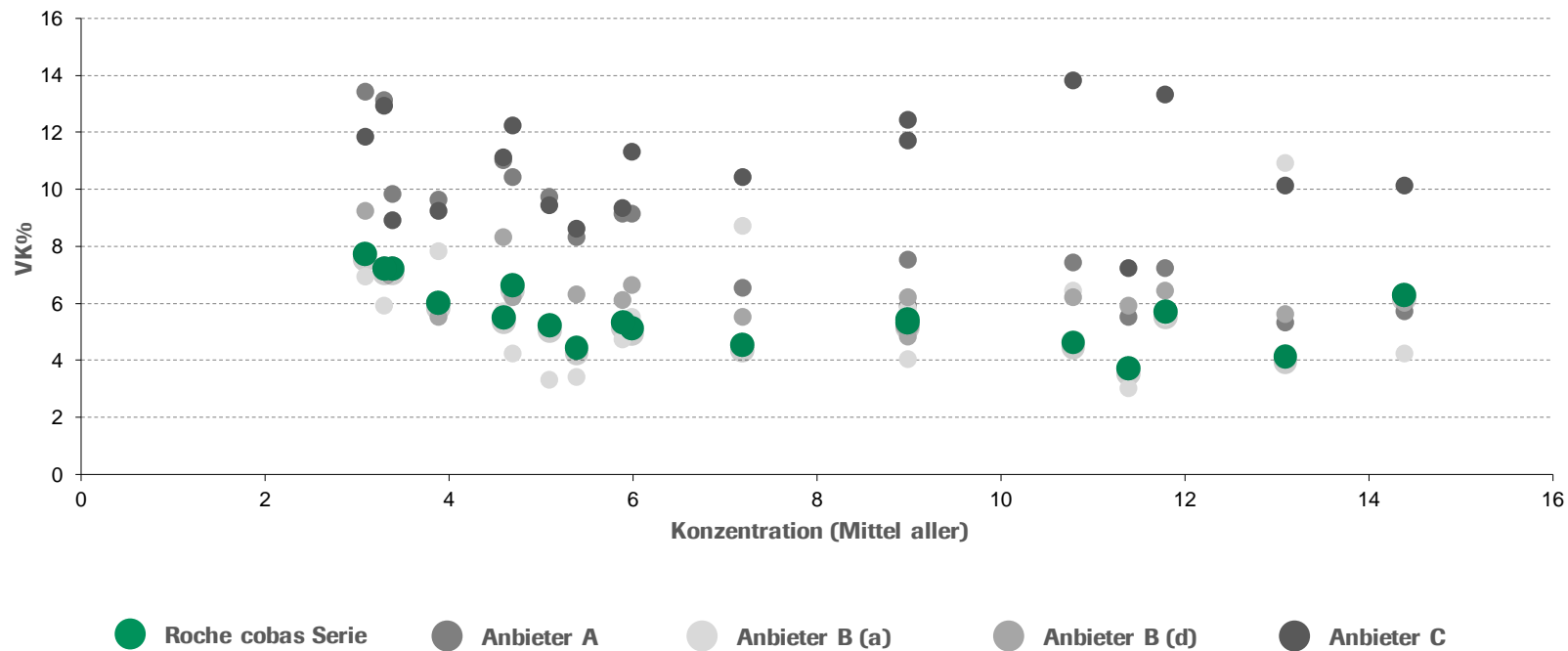


Quelle: NEQAS ring trial results 2015; data on file

Elecsys® Folat III /Folat III neu standardisiert

Herausragende Vergleichbarkeit von Lot zu Lot



Trend Elecsys® Folat III und Folat III neu standardisiert (2015-2016)

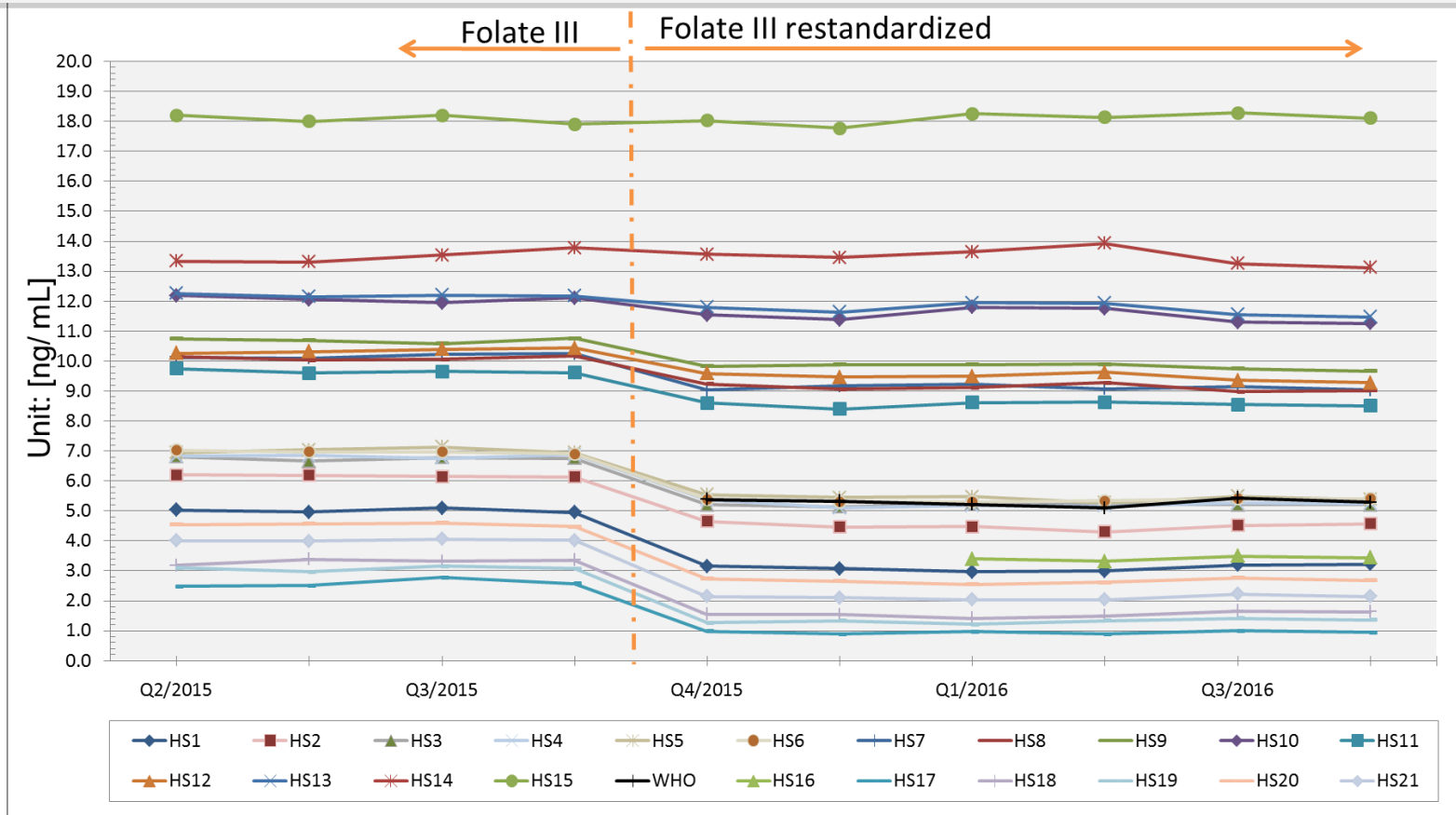

Quelle: Internal data;
data on file