

cobas[®]
Life needs answers



Wir sind gerne für Sie da.

Bei Fragen rufen Sie bitte unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im **Roche Kunden Service Center** an.

Gerne stehen wir Ihnen von **Montag bis Freitag** von **8.00 bis 18.00 Uhr** unter der Telefonnummer **0180/2 00 01 65** (6 Euro-Cent pro Gespräch aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, ggf. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) zur Verfügung. Dieses Angebot gilt nur für Deutschland.

ACCUTREND, COBAS und LIFE NEEDS ANSWERS sind Marken von Roche.

© 2007 Roche

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Straße 116
D-68305 Mannheim
www.roche.de

Roche Diagnostics (Schweiz) AG
Industriestrasse 7
CH-6343 Rotkreuz, ZG
Schweiz
www.roche-diagnostics.ch

05137489990 ☎ - 0807 -

Accutrend[®] Plus Kurzbedienungsanleitung



1 Legen Sie das Gerät auf eine ebene, vibrationsfreie Fläche und schalten Sie es ein.



2 Prüfen Sie die vollständige Funktion der Display-Anzeige. Überprüfen Sie Zeit und Datum.



3 Wenn im Display „codenr“ blinkt, führen Sie bitte einen Code-Streifen zügig bis zum Anschlag in die Teststreifenführung ein und ziehen Sie ihn anschließend sofort wieder heraus. Bitte **berühren** Sie hierbei **nicht** den bedruckten Bereich hinter dem schwarzen Balken. Lassen Sie die Messkammerklappe während dieses Vorganges geschlossen.



4 Bei erfolgreicher Kodierung erfolgt ein kurzer Signalton (sofern diese Funktion eingeschaltet ist). Wenn der Lesevorgang nicht einwandfrei abgeschlossen werden konnte, erhalten Sie eine entsprechende Fehlermeldung. Wiederholen Sie in diesem Fall den Vorgang nach einigen Sekunden.

5 Entnehmen Sie den gewünschten Teststreifen (Cholesterin, Triglyceride, Glukose oder Laktat) aus der Teststreifenröhre. Verschließen Sie die Teststreifendose sofort wieder, da die Teststreifen sonst vorzeitig (noch vor Ablauf des Haltbarkeitsdatums) unbrauchbar werden können.

6 Halten Sie den Teststreifen so, dass der aufgedruckte Messparameter nach oben zeigt. Schieben Sie den Teststreifen bis zum Anschlag in die Teststreifenführung. Wenn der Streifen die richtige Position erreicht hat, ertönen zwei Signaltöne (sofern diese Funktion eingeschaltet ist).



7 Öffnen Sie die Messkammerklappe.



8 Entnehmen Sie einen Tropfen Kapillarblut aus der Fingerkuppe oder dem Ohrläppchen.

- Probenvolumen:
- CHOL: 15–40 µl
 - TG: 10–40 µl
 - GLU: 15–50 µl
 - LAC: 15–50 µl

9 Blutauftragung im Gerät:

Setzen Sie den Blutstropfen innerhalb von 15 Sekunden auf das gelbe Probenauftragsfeld des Teststreifens. **Berühren** Sie hierbei das Auftragsfeld **nicht** mit dem Finger.



10 Alternative Blutauftragung außerhalb des Gerätes:

Entnehmen Sie nach dem Öffnen der Klappe den Teststreifen und lassen Sie die Klappe geöffnet. Setzen Sie den Blutstropfen innerhalb von 15 Sekunden auf das gelbe Probenauftragsfeld des Teststreifens. **Berühren** Sie hierbei das Auftragsfeld **nicht** mit dem Finger.



11 Schieben Sie den Teststreifen bei geöffneter Messkammerklappe wieder zurück in das Gerät. Schließen Sie anschließend die Messkammerklappe. **Der Messvorgang wird gestartet.**



Messzeit:

- Cholesterin: 180 Sekunden
- Triglyceride: 174 Sekunden
- Glukose: 12 Sekunden
- Laktat: 60 Sekunden

Nach Ablauf der Messzeit wird das Ergebnis im Display angezeigt. Messergebnisse, die außerhalb des Messbereiches liegen, werden als **Hi** (oberhalb des Messbereiches) oder **Lo** (unterhalb des Messbereiches) angezeigt.