

Sistema Urisys 1100[®]

Guida rapida

Esecuzione del test




- 1** Utilizzare le strisce reattive Combur¹⁰-Test UX.

Immergere brevemente (1 sec.) la striscia nel campione di urina ed estrarla facendo scorrere il lato sul bordo del recipiente per eliminare l'eccesso di urina.




- 2** Inserire la striscia con i tasselli rivolti verso l'alto nel portastriscia. L'estremità della striscia deve essere spinta sino in fondo per circa 2 mm sotto la clip che la trattiene.

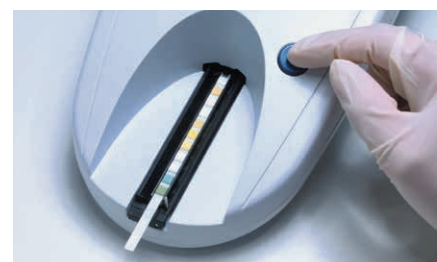


- 3** Premere il tasto START*. Un segnale acustico conferma e la barretta di tenuta si chiude. Verificare che la striscia sia posizionata correttamente nell'incavo centrale del portastriscia!

*È necessario inserire l'identificazione dell'operatore se questa funzione è attivata.

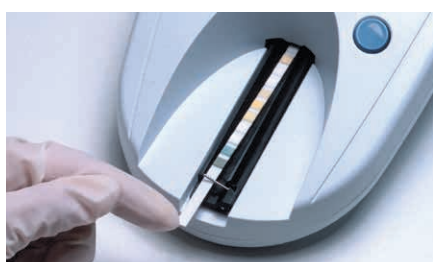

- 4** Se necessario, spostare manualmente la striscia nella giusta posizione.

È **importante** che la striscia sia **posizionata correttamente** ed il tasto START sia premuto **5-10 secondi dopo aver immerso la striscia nel campione.**

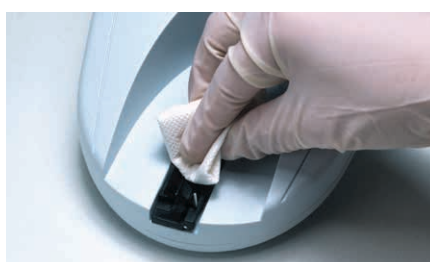

- 5** Terminata la misurazione, rimuovere e gettare la striscia usata. Asciugare i residui di urina con un panno che non lasci filamenti.

Per ulteriori informazioni consultare il manuale operativo.

Calibrazione del sistema Urisys 1100



Effettuare la calibrazione ogni 7 giorni o quando sul display appare il messaggio "RIPETERE CALIBRAZIONE!".

- 1 Se appare il messaggio "RIPETERE CALIBRAZIONE", premere il tasto di funzione a sinistra "Si". Sul display appare il messaggio "START CALIBRAZIONE".
Se il sistema Urisys 1100 è nello stato di pronto per la misurazione, premere il tasto di funzione a sinistra "Calibr.". Sul display appare il messaggio "START CALIBRAZIONE".
- 2 Inserire la striscia per la calibrazione con i tasselli rivolti verso l'alto nel portastriscia. L'estremità della striscia deve essere spinta sino in fondo per circa 2 mm sotto la clip che la trattiene.
- 3 Premere il tasto START.
- 4 Se la calibrazione è valida, viene stampato automaticamente "CALIBRAZIONE O.K.".
- 5 Se sul display appare uno dei seguenti messaggi di errore, consultare il manuale operativo:
 - "ERRORE TASSELLO RIFERIMENTO!"
 - "CALIBRAZIONE NON VALIDA!"
 - "ERRORE CALIBRAZIONE!"

Manutenzione quotidiana



Pulire il portastriscia al termine di ogni giornata di lavoro con acqua e detergente o disinfettante.

- 1 Spegnerlo lo strumento.
- 2 Estrarre il portastriscia dallo strumento.
- 3 Sciacquare la superficie del portastriscia sotto acqua corrente.
- 4 Eliminare con una spazzola morbida le leggere incrostazioni dovute ai residui di urina, soprattutto nell'area del meccanismo di tenuta e fra i denti sulla parte inferiore della slitta.
- 5 Pulire il portastriscia con alcool al 70% o altro disinfettante. Asciugare con un panno asciutto che non lasci filamenti.
- 6 Inserire il portastriscia nello strumento.
- 7 Accendere lo strumento.

Inserimento della carta



- 1 Aprire il coperchio della stampante premendo la parte in rilievo e togliere il vecchio rotolo.
- 2 Inserire nello scomparto il nuovo rotolo e tirare alcuni centimetri di carta oltre il bordo. La parte termosensibile (parte esterna del rotolo) deve essere rivolta verso il basso.
- 3 Chiudere il coperchio spingendolo verso il basso fino allo scatto. La carta deve fuoriuscire dalla fessura del coperchio della stampante.

ATTENZIONE: Per staccare lo stampato tirare orizzontalmente in avanti la carta sul bordo.

Per qualsiasi domanda sul contenuto del manuale operativo o per eventuale supporto tecnico contattare il servizio assistenza Roche Diagnostics.

COBAS, LIFE NEEDS ANSWERS, URISYS, URISYS 1100 e COMBUR-TEST sono marchi di Roche.

© 2019 Roche
Roche Diagnostics (Schweiz) AG
Industriestrasse 7
6343 Rotkreuz

diagnostics.roche.com/ch-urisy1100

cobas[®]