



Accutrend Plus

Stručná příručka



Měřicí přístroj Accutrend Plus se používá pro kvantitativní měření glykémie, cholesterolu, triglyceridů a laktátu v kapilární plné krvi. Měřicí přístroj je vhodný jak pro profesionální použití, tak pro sebetestování.

Výjimka: Přístroj Accutrend Plus není vhodný k sebetestování glukózy.




Poznámka:

Tato Stručná příručka není náhradou Návodu k použití. Před prvním použitím měřicího přístroje si pečlivě prostudujte Návod k použití k měřicímu přístroji Accutrend Plus.

1

Měřicí přístroj umístěte na rovný povrch nebo ho držte v ruce. Měřicí přístroj zapněte stisknutím tlačítka **Zapnuto/ vypnuto** ①.

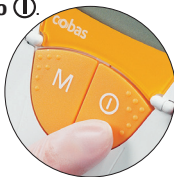

2

Zkontrolujte, zda se všechny prvky správně zobrazují. Zkontrolujte čas a datum (chcete-li tyto informace ukládat spolu s výsledky).



Jestliže dosud nebyl v měřicím přístroji uložen žádný kód, bude blikat *codenr* se třemi pomlčkami. V opačném případě se zobrazí poslední uložený kód.



Pokaždé, když otevřete novou nádobku s testovacími proužky, musíte nakódovat měřicí zařízení.

3

Podle obrázku vložte kódový proužek.

Nedotýkejte se potištěné části za černou čarou nebo spodní strany proužku.



4

Nechte kryt měřicí komůrky uzavřený a opatrně zasuňte kódový proužek do vodicí lišty až nadoraz a poté ho okamžitě vyjměte.

5

Jako potvrzení správného nakódování se ozve krátké pípnutí (pokud je aktivována zvuková signalizace) a měřicí přístroj zobrazí kód. Jestliže dojde k chybě nebo se nezobrazí kód, postup za několik sekund opakujte.

6

Vyjměte testovací proužek z nádoby. Vždy ihned nádobku uzavřete. V opačném případě se mohou testovací proužky znehodnotit ještě před uplynutím expirační doby.



7

Uchopte testovací proužek podle obrázku a zasuňte ho až nadoraz. Když testovací proužek správně zasunete, uslyšíte dvě pípnutí (jestliže je aktivována zvuková signalizace). Zobrazí se číselný kód testovacího proužku.


8

Otevřete kryt měřící komůrky.



9

Pomocí odběrového pera provedte vpich na vnější straně konečku prstu, abyste získali **velkou převislou kapku krve**.

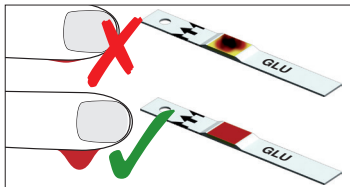

Kapku krve můžete na testovací proužek nanést, když je proužek **uvnitř** měřicího přístroje nebo i **mimo** něj.

Aby byl výsledek správný, aplikační zóna testovacího proužku musí být zcela pokryta krví.

10

*Nanesení krve **v měřicím přístroji**:*


Převislou kapku krve **okamžitě** naneste z prstu na žlutou aplikační zónu testovacího proužku. **Nedotýkejte** se aplikační zóny prstem. Pokračujte krokem (12).



11

*Nanesení krve **mimo** měřicí přístroj:*

Vyjměte testovací proužek a nechte kryt otevřený. **Velkou převislou kapku krve** okamžitě naneste z prstu na žlutou aplikační zónu testovacího proužku. **Pokožka prstu se nesmí dotknout** aplikační zóny testovacího proužku. Zasuňte testovací proužek do měřicího přístroje.

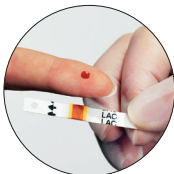

Uzavřením krytu zahájíte měření.



Měření začne.

Poté se zobrazí výsledky:

▶ Glukóza:	12 s
▶ Cholesterol:	180 s
▶ Triglyceridy:	max. 174 s
▶ Laktát:	60 s

Po dokončení měření měřicí přístroj zapípá (jestliže je zapnutá zvuková signalizace) a zobrazí se výsledky.

Výsledky testu, které leží mimo rozsah měření, se zobrazí jako *Hi* (vyšší než měřicí rozsah) nebo *Lo* (nižší než měřicí rozsah).



ACCUTREND a COBAS
jsou ochranné známky Roche.

V případě dotazů kontaktujte:
Roche s.r.o.
Diagnostická divize
Karlovo náměstí 17
120 00 Praha 2
Tel.: +420 220 382 500



Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim
Německo

www.roche.com