

# Validation post intervention

*cobas p312*

## Actions à réaliser selon le type d'intervention

Interventions Curatives	Module Touché	VALIDATION	
		Technique	Analytique
Problèmes Mécaniques	Table de tri	T1+T2+T3	Sans objet
	Déboucheur	T1+T2+T3+T4	Sans objet
	Gripper	T1+T2+T3	Sans objet
Problème électronique / électrique	Instrument	T1+T2+T3	Sans objet
Anomalies Connexions	Instrument	T3	Sans objet
<b>Interventions Préventives</b>			
12 mois	Instrument	T1+T2+T3	Sans objet

## Rôle de ces actions

VALIDATION TECHNIQUE	Code	Eléments Validés
Test du module avec Rtools	T1	Vérification de l'ensemble des mécanismes
Arrêt + Remise en route système complet avec rechargement Work Cycle	T2	Vérification de l'initialisation de tous les modules
Passage en routine client (selon activité)	T3	Vérification du fonctionnement en mode routine
Cap Search avec tube Sarstedt 66x11	T4	Vérification du fonctionnement du module déboucheur
VALIDATION ANALYTIQUE	Code	Objectif
Sans objet		