

**Instruction de désactivation  
avec décontamination  
CoaguChek Pro II**



Nom du Laboratoire :

Code Postal :  Ville :

Numéro de Série :  Num Case :

Code alarme/  
Description du  
problème:

Contact Roche

Type		Actions		Fait	Notes
Type	N°	Détail			
Arrêt système	1	Au besoin, retirez le lecteur du socle (base) et posez le sur une surface plane. Si la désactivation concerne la base unit, débranchez le cordon d'alimentation électrique.			
Effacement	2	Effacez les données patient contenues dans le lecteur conformément à la réglementation RGPD (Réglages / Options / Base de données / Suppr. Base de données).			
Décontamination (externe)	3	Nettoyez les surfaces du lecteur à l'aide d'un chiffon doux légèrement humecté avec l'un des désinfectants suivants : - <b>Solution d'hypochlorite de sodium (0,625%)</b> - <b>Chlorure d'ammonium (jusqu'à 0,25% de chaque composé d'ammonium quarternaire) avec de l'alcool l'isopropylique (jusqu'à 55%)</b> - <b>Solution à 0.05% d'un composé phénolique dans de l'eau</b>			
Décontamination (interne)	4	Retirez le volet bleu de la chambre de mesure et nettoyez la zone blanche à l'aide d'une compresse non peluchante ou d'un coton-tige humidifié avec un désinfectant. Remplacez ensuite le volet bleu.			
Attente	5	Laissez sécher le lecteur à l'air libre.			
Préparation	6	Retirez la batterie du lecteur avec un tournevis Torx taille 5 nécessaire.			
Emballage	7	Enroulez le lecteur dans du papier bulle pour le protéger durant le transport et placez le dans un carton d'expédition.			
Confirmation	8	Joindre le certificat de décontamination dûment rempli <b>au case</b> .			
Suivi	9	<b>Joignez le certificat</b> de décontamination dûment rempli au lecteur lors de son envoi.			

Désinstallation techniquement conforme

Décontamination **OBLIGATOIRE** techniquement conforme

Nom du Client

Signature / Date :

**Destination du lecteur**

1	Destruction	<input type="checkbox"/>
2	Retour atelier	<input type="checkbox"/>