

Mise à jour du firmware du coaguchek INRange

Prérequis



Etape 1 : Préparation du lecteur pour la mise à jour

CoaguChel[®] INRange Mah Mers III Tos Mah Mensults Reminders Coher Del27 Ff.d 20 Ger 2016

	Menu Princ 🔳
٦	Test
Ð	Mes résultats
۵	Rappels
	Paramètres
*	Autres
17:	03 17 Sept 2018

Autres	
À propos	
Effacer mémoire	
Journal lecteur	
Afficher test	
Mise à j. firmware	

- Lecteur Coaguchek INRange
- Cable USB type A/ micro-USB (inclus dans la boite du lecteur)
- Jeu de 4 piles AAA
- Ordinateur PC ou Mac
- Le firmware téléchargé.
- Insérez les 4 piles neuves dans le lecteur.
- Démarrez le lecteur.

• Allez dans le menu « Autres ».

• Allez dans le sous-menu « Mise à j. firmware ».



Etape 2 : Connection du lecteur à l'ordinateur



Etape 3 : Copie du fichier sur le lecteur.

. Submit i in the intervent brance du out congrede Merme du out construction du out construc

- Assurez-vous que le PC soit démarré et qu'une session utilisateur soit ouverte dessus.
- Connectez le câble micro-USB sur le lecteur.
- Connectez la partie USB du câble sur le PC.
- Le lecteur affiche « Pour la mise à jour du firmware, copiez le fichier dans le lecteur Coaguchek ».
- Téléchargez le fichier de mise à jour sur votre ordinateur si cela n'a pas déjà été fait.
- Localisez le fichier
- Sélectionnez-le, et faites un clic droit, puis sélectionnez « copie » dans le menu déroulant qui s'affiche.
- Localiser le Coaguchek INRange dans l'explorateur de votre PC. Il est listé dans les disque locaux (comme une clé USB).
- Sélectionner le Coaguchek INRange dans votre explorateur et faites un clic droit, puis choisissez « coller » dans le menu déroulant qui s'affiche.





- La mise à jour s'effectue ensuite automatiquement en quelques minutes.
- L'affichage change automatiquement pendant la procédure de mise à jour.

Etape 4 : Vérification de la version



- Attendez jusqu'à ce que le lecteur s'éteigne, et rallumez le lecteur.
- Allez ensuite dans le menu « Autres », puis « A propos ».
- Si la version est différente de celle téléchargée, la mise à jour n'a pas été installée sur le lecteur. Recommencez la procédure.
- Si la procédure échoue à nouveau, contactez les services techniques Roche Diagnostics France.