

コアグチェックXS 操作方法



測定準備

- ・テストストリップは測定の直前にバイアルから取り出す
- ・ランセットを準備(まだ穿刺しない)



コードチップ準備

- ・コードチップのロット番号を確認し、コアグチェックXSに挿入



電源ON

- ・電源ボタンを押し、電源を入れる



テストストリップ挿入

- ・テストストリップを矢印の方向に、奥まで挿入
- ・テストストリップを取り出した後は、バイアルの蓋をすぐに閉じる



ロット番号確認

- ・画面に表示されたロット番号が、テストストリップのバイアルと合致していることを確認
- ・確認後、Mボタンを押す




穿刺により採血

- ・ランセットにより指先に8uLの血液のしずくをつくる
- ・または抗凝固剤なしの採血管に静脈採血する



血液滴下

- ・テストストリップの透明な部分に検体滴下を添加
- ・穿刺の場合、1滴目を上からまたは横から滴下
- ・静脈の場合、4-5滴捨ててから、上から滴下
- ・ピープ音が鳴ったら検体量は十分、検体を追加しないこと

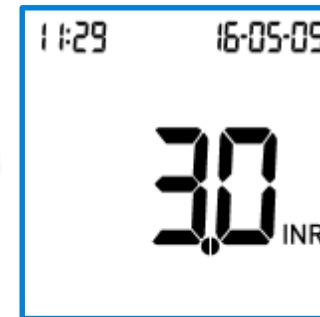

結果表示

- ・選択した単位で、結果表示(結果は自動的に保存)

10秒程度の加温完了後、180秒のカウントダウンが開始

15秒以内に血液を滴下

QCチェック

コアグチェックProII 操作方法



測定準備

- ・テストストリップは測定の直前にバイアルから取り出す
- ・ランセットを準備(まだ穿刺しない)



コードチップ準備

- ・コードチップのロット番号を確認し、コアグチェックProIIに挿入
- ・すでに登録済みのロットであれば不要ですが、保管を推奨




電源ON

- ・電源ボタンを押し、電源を入れる



測定メニューを選択

- ・測定アイコンを選択
- ・患者IDをONに設定している場合、患者IDを入力あるいはバーコード読み込み

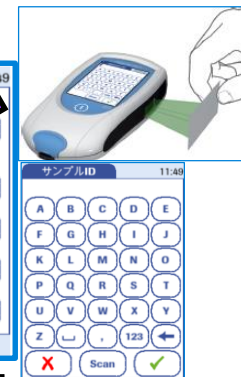

テストストリップ挿入

- ・テストストリップを矢印の方向に、奥まで挿入
- ・テストストリップを取り出した後は、バイアルの蓋をすぐに閉じる
- ・ロット番号の確認は自動的に終わる

10秒程度の加温完了後、180秒のカウントダウンが開始



穿刺により採血

- ・ランセットにより指先に8uLの血液のしずくをつくる
- ・または抗凝固剤なしの採血管に静脈採血する

15秒以内に血液を滴下



血液滴下

- ・テストストリップの透明な部分に検体滴下を追加
- ・穿刺の場合、1滴目を上からまたは横から滴下
- ・静脈の場合、4-5滴捨ててから、上から滴下
- ・ピープ音が鳴ったら検体量は十分、検体を追加しないこと

QCチェック



結果表示

- ・選択した単位で、結果表示(結果は自動的に保存)
- ・QRコード表示をONに設定している場合、QRコードが表示可能