

# 穿刺器具の操作方法と試薬ディスクへの血液点着方法

コバス b 101用  
HbA1c  
測定試薬ディスク



コバス b 101用  
脂質  
測定試薬ディスク



## Step 1 指先からの穿刺器による採血 採血の前に石鹸で手を洗い、十分に乾燥させてください。

### キャップをねじる



①保護キャップをねじります。

### キャップを外す



②保護キャップを取り外します。

### 深度を調節する



③深さ調節ダイヤルをまわして穿刺深度を調節します。初期設定では、深さ目盛り(中)になっています。  
※必ず保護キャップを外してから行ってください。

### ボタンを押す(穿刺)



④アルコール消毒綿で穿刺部位(中指または薬指)の側面を消毒します。**完全に乾いたのを確認**してから、本品を穿刺部位に軽く当て、穿刺ボタンを押します。

## Step 2 試薬ディスクへの点着

HbA1cのみ

脂質または両方



⑤測定に必要な血液を**指先に滴状**にします。



⑥写真(○)のようにディスク吸引ポイントから血液をディスクに吸引させます。

HbA1c測定用


脂質測定用



⑦ディスクを裏返し、青色で囲まれた領域が血液で完全に満たされたことを確認します。

測定者に  
試薬ディスクを  
お渡しください。

### 各部の名称

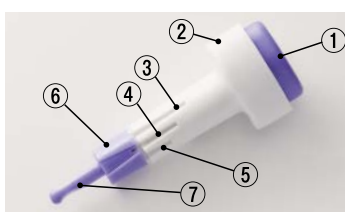

- ① 穿刺ボタン
- ② ホルダー
- ③ 深さ目盛り(大)
- ④ 深さ目盛り(中)
- ⑤ 深さ目盛り(小)
- ⑥ 深さ調節ダイヤル
- ⑦ 保護キャップ

### 穿刺設定目安

	穿刺深度	目安
③ 深さ目盛り(大)	2.3mm	皮膚のかたい(厚い)人
④ 深さ目盛り(中)	1.8mm	皮膚のかたさが普通の人
⑤ 深さ目盛り(小)	1.3mm	皮膚の柔らかい(薄い)人



試薬ディスクに血液を吸引させる時は、  
指上の**血液が固まらないよう**  
**手早くディスクに吸引**させるように  
してください。

